


# Dale® abdominaalitukivyön pukemisohje

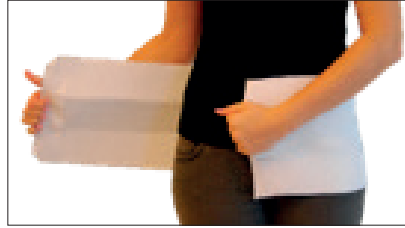

1. Aseta tuki siten, että sen keskisauma on selkärangan kohdalla. Tuen yläreunan tulee olla juuri navan alapuolella. Venytä tukea ulospäin.



2. Vedä tuen vasen reuna kohti vartalon keskiosaa.



3. Kiinnitä tuki sen Velcro-tarra-kiinnityksellä.

## Pesuohe



Konepesu 40–60° asteessa ei vahingoita tuotteen toiminnallisia ominaisuuksia, kun tarrakiinnitys on paikoillaan ja käytät mietoa pesuainetta.



Käsinpesu tai hienopesu 30° asteessa turvaa tuelle mahdollisimman pitkän käyttöiän.



Ripustuskuivaus



Huomio! Aseta tarrakiinnitys paikoilleen ennen pesua tarran nukkaantumisen estämiseksi.



Kloorivalkaisu kielletty

Dale Abdominal Binder, CE-merkitty lääkinällinen laite. Valmistaja: Dale Medical Products, Inc. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa.

**Steripolar**  
Taking care further

### Ota yhteyttä

steripolar@steripolar.fi  
Asiakaspalvelu klo 8.00–16.00  
+358 (0) 9 417 606 00

**steripolar.fi**

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485