



easywrap®

ANVÄNDARINSTRUKTIONER FÖR ÖVRE EXTREMITET

TILLVERKARE



Haddenham Healthcare Ltd
Crendon House, Crendon Industrial Park
Long Crendon, HP18 9BB
Yhdistynyt kuningaskunta

IMPORTÖR

Steripolar Oy



www.steripolar.fi



09 417 60600



steripolar@steripolar.fi



kun hoitotulokset ratkaisevat



Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

ALLMÄN INFORMATION	s.3
SKÖTSELINSTRUKTIONER	s.4
ALLMÄNNA PÅKLÄDNINGSINSTRUKTIONER	s.5
ATT TA AV EASYWRAP	s.7
SLITAGE	s.7
INDIKATIONER	s.7
FÖRVARING, GARANTI OCH FÖRSTÖRANDE	s.8
SKÖTSELINSTRUKTIONER	s.9

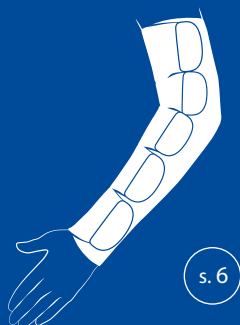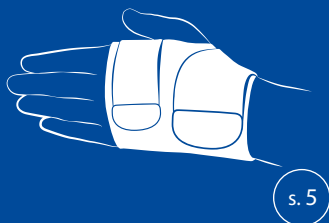

ALLMÄN INFORMATION

Tack för att du valde **easywrap**. **easywrap**-produkterna är effektiva vid behandling av lymfatiska sjukdomar och blodkärlssjukdomar. Med hjälp av **easywrap** kan kvalificerad vårdpersonal sköta ödem i fall där kompressionstejp/-strumpor och/eller kompressionsärmar/-handskar inte kan användas. Produkten kan även användas tillsammans med dessa. **easywrap** är ett påklädbart stöd av låg profil som anpassar sig till extremiteten och erbjuder långvarig kompression.

easywrap-produktserien är utvecklad för att erbjuda högt arbetstryck och lågt vilotryck. Till skillnad från traditionella icke-elastiska stöd, erbjuder **easywrap** konstant kompression även då svullnaden minskat. Resultatet är att ödemet blir lindrigare utan att patientens komfort lider och med små justeringar. **easywrap** textilerna kan även användas ovanpå aningen vätskeutsöndrande sår genom att under dem använda lämpliga absorberande bandage. **easywrap** kan även användas som ett ytterligare lager ovanpå stödkläder (enligt rekommendation av specialist) för att förhindra att ödemet förnyas.

easywraps vårdande verkan förutsätter noggrann passform. Dåligt sittande **easywrap**-produkter kan förorsaka problem under användningen. **easywrap** bör användas enbart på basen av rekommendation eller ordination av kvalificerad vårdpersonal. För att garantera bästa vårdeffekt bör **easywrap** användas från morgon till kväll. Använd inte stödet under bäddvila såvitt inte läkare eller annan specialist rekommenderar annat. Kompressionstextilen kan i sällsynta fall förorsaka allergiska reaktioner.

Ifall du upplever akut smärta i extremiteterna eller hudirritation då du använder **easywrap**, ta av textilen och kontakta din läkare omedelbart.

SKÖTSEL AV STÖDET

GÖR SÅ HÄR



Tvätta textilerna i en tvättpåse, om det bara är möjligt

GÖR INTE SÅ HÄR



Använd inga extra medel, såsom sköljmedel, optiskt blekmedel eller fläckborttagare




Torka inte textilerna på värmelement eller i torktumlare

Ytterligare information om skötsel och förvaring av din produkt finns på sidan 9

Tre enkla steg för påklädandet av easywrap



PLACERA > TÄNJ UT > FÄST

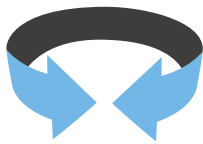

1 Sätt med hjälp av panelen extremiteten i rätt ställning

2 Tänk lätt ut panelen runt extremiteten tills materialet "låser sig"

3 Håll textilen uttänjd och fixera panelen med fixeringsbanden för att åstadkomma lämplig kompression.

Mer exakta instruktioner för din produkt finns på sidorna 5–6

PÅKLÄDNING AV **easywrap** HANDDELEN



1 Sätt din tumme i tumöppningen och försäkra dig om att den bredare av de två panelerna är närmast din handled.



2 Dra lätt i den bredare panelen tills materialet "låser sig".

Ifall du använder kompressionshandske, klä på dig den på först

PÅKLÄDNING AV **easywrap** HANDDELEN



3 Håll materialet spänt och fäst panelen över handryggen.



4 Spänn till sist den resterande panelen tills materialet "låser sig" och fäst över handryggen.

PÅKLÄDNING AV **easywrap** ARMDELEN



1 Glid in handen i stödet, tills ärmens övre del precis når upp till armhålan och sömmen är i linje med din tumme.



2 Böj en aning på armen och dra panelen närmast din handled tills materialet "låser sig".

TIPS: Ändan, där det finns en lapp, är stödets övre del

PÅKLÄDNING AV **easywrap** ARMDELEN



3 Håll materialet spänt samt fixera panelen och kontrollera att den ligger parallellt med ändan på armen och inte i vinkel.



4 Upprepa punkterna 2 och 3 med de övriga panelerna. Kontrollera att de ligger lodrätt, jämnt och utan skrynklor.

AVKLÄDNING AV **easywrap** STÖDET

Ta av dig **easywrap** så att du börjar med panelen närmast kroppen och sedan framskrider neråt och bortåt från kroppen.

Vik försiktigt fixeringsbanden tillbaka till utsidan panelen.

Förvaring och tvätt av stödet så att fixeringsbanden är fast hindrar dem från att skada stödet eller övriga kläder.

SLITAGE

easywrap-textilernas ytteryta är planerad så att den fäster sig vid panelerna. Produkterna är planerade och testade för att fungera effektivt under hela sin användningstid. Textilen kan bli noppig, vilket är normalt slitage för den.

Fixeringsbanden kan tvinnas under tvätten. Ifall så sker, tvinna banden lätt i motsatt riktning.

INDIKATIONER

Huvudindikationer

easywrap Light för medelsvårt och segt lymfödem eller ödem; lindrande behandling; återkommande ödem; långvarigt lymfödem.

Sekundära indikationer

easywrap Light för kontroll av lindriga eller medelsvåra svullnadssjukdomar.

ABSOLUTA KONTRAINDIKATIONER

Använd inte produkten ifall du lider av någon av de följande: avancerad perifer arteriell sjukdom; dekompenenserade hjärtsjukdomar; hjärtsvikt i dålig balans; obehandlad septisk flebit (infektion i venerna); phlegmasia coerulea dolens. Kända allergier mot materialen som används i stöden.

RELATIVA KONTRAINDIKATIONER

Produkten kan i vissa fall förorsaka symptom hos personer om lider av följande: rörelsehinder (sängliggande patienter); hudsjukdomar; vätskeutsöndrande hudsjukdomar; textilinkompatibilitet; nedsatt sensibilitet i extremiteten (t.ex. i diabetes mellitus); variga hudsjukdomar; i regel kronisk polyartrit; avancerad neuropatisk smärta; i regel kronisk artrit. Allergi eller allergiliknande reaktioner mot tyget.

FÖRVARING, GARANTI OCH FÖRSTÖRANDE

För stöd i normalt bruk är garantitiden sex månader. Garantin täcker inte normalt slitage, missbruk eller bristande skötsel. **easywrap**-textilerna bör inte användas efter den sista användningsdagen som är angiven på förpackningen. Förvara kompressionsstödet i rumstemperatur skyddat för solljus, hetta och fukt. Stäng **easywraps** fixeringsband mellan användningarna. Då stöden är slutanvända, kan de förstöras tillsammans med hushållsavfall.

SKÖTSELINSTRUKTIONER

Ifall **easywrap**-textilen är i kontakt med huden, skall den tvättas dagligen. **easywrap**-textiler, som inte är i kontakt med huden kan tvättas vid behov. För personer, vars **easywrap**-textiler kräver tvätt oftare, lönar det sig att skaffa två stycken stöd, så att det ena är i användning och det andra i tvätt, vilket förbättrar användningstiden för båda stöden.

easywrap-textilerna skall skötas på samma sätt som känsliga klädesplagg. Vi rekommenderar att **easywrap** tvättas i en tvättpåse. Stäng fixeringsbanden innan tvätt.

Tvätta **easywrap** med vanligt mild tvättmedel. ANVÄND INTE EXTRA MEDEL, som sköljmedel, optiskt blekmedel eller fläckborttagare. Skölj stödet noggrant. Torka mellan två handdukar. Vrid inte för att torka. Torka största delen av fukten genom att trycka. Låt torka på plan yta eller häng upp för att torka. **TORKA INTE PÅ VÄRMEELEMENT ELLER I SOLLJUS. TORKA INTE STÖDET I TORKTUMLARE.** Varning: Vassa naglar, ringar eller armband kan skada stödet.

www.easywrap.info

easywrap

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00 | www.steripolar.fi | ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

9/2019