

POTILAALLE

- PolyMem-sidoksella vaikutat potilaan tuntemaan haavakipuun vähentävästi
- Voi vähentää kipulääkkeiden ja antibioottien tarvetta
- Käyttö aktivoi haavapohjaa ja vähentää haavan kroonistumisen riskiä



HOITAJALLE

- Vähentää haavan mekaaniseen puhdistukseen käytettävää aikaa
- Parantaa potilaan hoitoon sitoutumista
- Helppokäyttöinen sidos sekä helppo vaihtotarpeen tunnistus
- Haavanhoito yhdellä sidoksella: parantaa, puhdistaa, sitoo eritteen ja vähentää kipua

HOITOYKSIKÖLLE

- Pienet pakkauskoot
- Nopea toimitus Espoon varastoltamme
- Saatavilla oleva tuotetuki



VÄHÄINEN ERITYS RUNSAS ERITYS HUOMIOITAVAA

MUSTA, KUIVA, NEKROOTTINEN



PolyMem

-

- Huomioitava haavan diagnoosi.
- Kiinnitys reunoilta kalvolla.

KELTAINEN, KATTEINEN



PolyMem

PolyMax
PolyWic

- Mikäli haavapinta on kuiva, kostuta sidos tipalla vettä.
- Kiinnitys reunoilta kalvolla.

PUNAINEN, GRANULOIVA



PolyMem

PolyMax

- Kiinnitys reunoilta kalvolla.

VAALEANPUNAINEN, EPITELISOIVA



PolyMem

-

- Kiinnitys reunoilta kalvolla.

INFEKTOITUNUT



PolyMem Silver

PolyMax Silver

- Kiinnitys reunoilta kalvolla.

ONKALO/ SYVÄHAAVA



PolyWic
PolyWic Silver tai
PolyWic Silver Rope

Päälle runsaasti-
imevä sidos.

- Täytä haavan koosta vain puolet PolyWic-sidoksella, joka turpoaa haavaeritteestä.

SORMI-/VARVASHAAVA



PolyMem ja
PolyMem Silver
sormi- ja
varvassidos

-

- Kiinnitys Carefix-sormi-/varvas-sidoksella.

Huom! Kaikkien PolyMem-sidosten vaihtoväli on 7 vrk.

