


# PIKAKÄYTTÖOHJE **PolyMem**

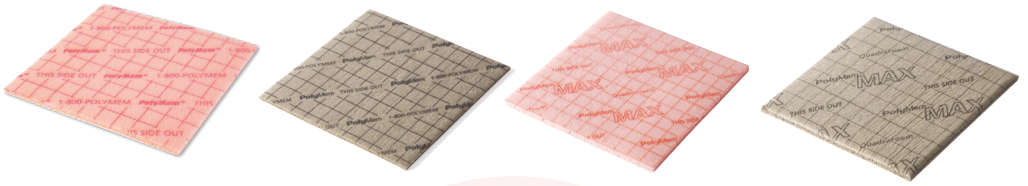

## Käyttöaiheet **PolyMem** ja **PolyMem Silver**

- Katteiselle, vähän erittäväälle haavalle.
- Punapohjaiselle granuloivalle haavalle.
- Kuivalle haavalle kostutettuna. Tuotetta voi tarvittaessa kostuttaa vesipisaralla.
- **PolyMem Silver** infektoituneille haavoille tai palovammoille.

## Käyttöaiheet **PolyMax** ja **PolyMax Silver**

- Runsaammin erittäville haavoille (myös katteisille haavoille).
- 60 % suurempi imukyky kuin PolyMem sidoksessa.
- Max-sidokset kaikkein hengittävimät taustakalvallisista PolyMem-sidoksista. Haihduttaa runsaasti kosteutta.
- **PolyMax Silver** infektoituneille haavoille tai palovammoille.

## Sidoksen käyttö ja kiinnitys

- Aseta haavalle ruutupuoli ylöspäin. Sidos ylittää haavareunat 1-2 cm.
- Sidoksen alle eikä päälle tule laittaa muita tuotteita.
  - Kalvokiinnitys vain reunoilta. Sidoksen ruutupuolella on jo kalvo.
  - Teippikiinnitys ihoystävällisellä teipillä sidoksen reunoilta.
  - Putki- tai verkkosidoskiinnitys.
  - Kierresidoskiinnitys.
- Sidosvaihto max 7 vrk. Vaihda viimeistään, kun sidoksen reunimmainen ruutu enää kuiva.

## HUOMIOI!

- Haavaeritys voi lisääntyä hoidon alussa.

*kun hoitotulokset ratkaisevat*

**Steripolar**

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

# PIKAKÄYTTÖOHJE **PolyWic**



## Käyttöaiheet **PolyWic** ja **PolyWic Silver** -syvähaavasidokset

- Syvä haava: haavapohja näkyy, haavasyvyyttä vähintään 1,5 cm. Täytä haavan tilavuudesta vain 50 %.
- Pinnallinen haava: laita tuotetta pari mm. haavan kokoa pienempänä. Tuote turpoaa.
- Onkalohaava: Valitse vetoluja **PolyWic Silver** rope -nauhasidos.
- **PolyWic Silver** infektoituneille haavoille tai palovammoille.

## Sidoksen käyttö ja kiinnitys

- Voidaan asettaa haavalle kummin päin tahansa.
- Sidosta voi repiä käsin haavan muotoiseksi.
- Täytä sidoksella vain 50 % syvän haavan koosta, sillä sidos turpoaa haavaeritteestä.
- Vaatii päällelleen imevän sidoksen, esim. **PolyMem**, **Curea P1** tai **Curea Clean**.
  - **PolyWic** voidaan peittää kokonaan kalvolla, jos päällä ei ole imevää sidosta.
  - Jos imevänä sidoksena käytetään **PolyMem**- tai **Curea**-sidoksia, ne tulee kiinnittää esim. kalvolla **vain reunoilta**.
- Sidosvaihto max 7 vrk.

*kun hoitotulokset ratkaisevat*

**Steripolar**

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

10/2018