


Traxi-tarra

Obeeseille potilaille sectioihin ja vatsan alueen robottikirurgiaan

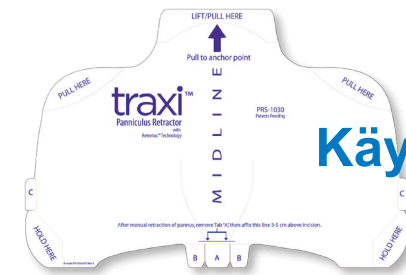


Käyttöohje

5 askelta Traxi panniculus -tarran asettamiseen

1. Varaa 2 henkilöä tarran asettamiseen. Tarra asetetaan sectiossa pestylle ja hyvin kuivatulle iholle steriilisti ennen mahdollista sectiopeittelyä.

Potilaan molemmille puolille Panniculus Retractor tarran asettajat ja tarvittaessa kolmas henkilö potilaan pääpäätyyn nostamaan, ohjaamaan ja tukemaan vatsanahkaa.


2. Poista tarrasta A-paneeliosa ja aseta tarra keskilinjassa noin 5 cm aiotun viillon yläpuolelle. Tarvittaessa potilaan pääpäädyssä oleva avustaja vetää ja ohjaa nahkaa keskilinjaan.

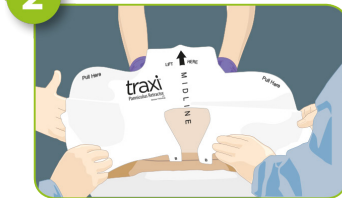

3. Tämän jälkeen tarran asettajat sivuilla ottavat samaan aikaan B-paneelin teipit auki, jolloin saadaan alavatsa kiinnitettyä koko alaltaan. Huomioi potilaan keskilinja.

4. Käännä tarran yläosa (kiinnittämätön osa) kiinnitetyn osan päälle kaksin kerroin. Poista tämän jälkeen C-paneeli. Vedä tarraa molemmilta puolilta riittävän napakasti ylös ennen kuin liimaat/ kiinnität tarran ihoon.

5. Mikäli potilas on erittäin obeesi, vedä tarraa ylikorostetusti ylös, koska nahka palaa aina hieman takaisin. Näin saat parhaan mahdollisen tuen.

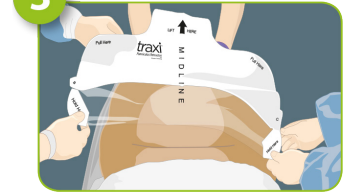

kun hoitotulokset ratkaisevat



Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

Traxi-tarra



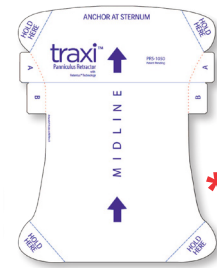
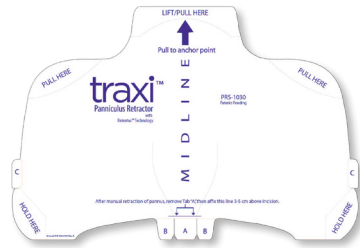


Käyttöohje

3 askelta Traxi Extender* -lisäteipin asettamiseen

Mikäli BMI on yli 50, tarvitaan mahdollisesti lisäksi Traxi Extender teippi antamaan paras mahdollinen tuki. Varaa 2 henkilöä myös tämän teipin paikoilleen asettamiseen.

1. Aseta ensin Traxi Panniculus retractor normaalisti.
2. Avaa Traxi Extractor -teipin A-paneeli ja aseta se keskilinjassa potilaan rintojen alle.
- 3-4. Poista B-paneeli ja vedä se kireälle alaspäin. työnnä vatsanahkaa vielä alhaalta ylöspäin tarran alle ennen kiinnitystä, saadaksesi paras mahdollinen tuki.

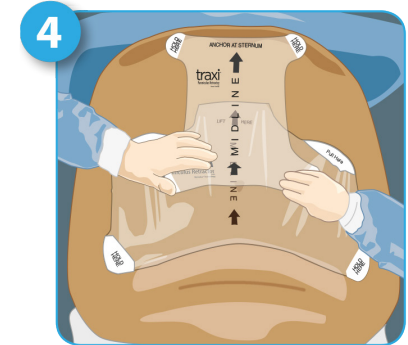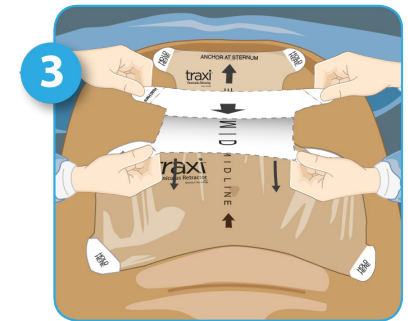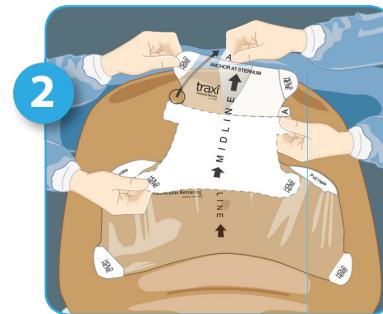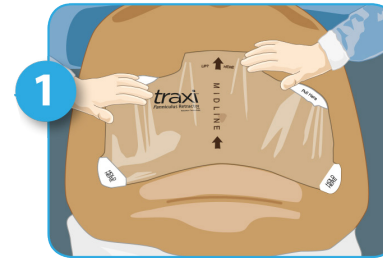

Traxi-tarran asennusvideot löydät osoitteesta:
www.bit.ly/traxivideo

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

11/2016