



Paikoilleen asettaminen

- Liukasta rengas vedellä tai voiteella
- Nosta jalka jakkaralle tai sängynreunalle
- Purista rengas kasaan kahden sormen väliin.
Aseta rengas puristettuna mahdollisimman ylös emättimeen

Poistaminen

- Tartu etusormella renkaan reunasta ja poista rengas varovasti

Puhdistaminen

- Pestään päivittäin juoksevalla vedellä
- Keittäminen tai sterilointi saattaa vaurioittaa materiaalia

Renkaiden käyttöikä

- PVC-rengas vaihdetaan uuteen jokaisella kontrollikäynnillä
- Silikonirengas suositellaan vaihdettavan uuteen vuoden välein

kun hoitotulokset ratkaisevat