



Ominaisuudet

- Virtsainkontinenssin hoitoon
- Rengas kohottaa virtsaputken asentoa ja sulkee sen mekaanisesti kiinni emättimen einämään estäen virtsankarkailua
- Gynekologi arvioi renkaan käyttöajan potilaan yksilöllisten ominaisuuksien ja limakalvojen kunnon mukaan
- Potilas voi asettaa renkaan itse, mahdollisesti päivittäin, kun on saanut ohjauksen sen oikeaoppiseen käyttöön

Käyttö

- Rengas on kiinteää silikonia
- Yleisimmin käytetyt koot: 65 mm–80 mm (saatavilla tarvittaessa 12 kokoa 45 mm–100 mm) Rengas suositellaan vaihtamaan uuteen vuoden välein
- HUOM. Vanhemmat uretrarengasmallit saattavat sisältää metallijousen Uretrarengas on poistettava ennen MRI-tutkimusta!

Paikoilleen asettaminen


- Liukasta rengas vedellä tai voiteella
- Nosta jalka jakkaralle tai sängynreunalle
- Purista rengas kasaan kahden sormen väliin. Aseta rengas puristettuna mahdollisimman ylös emättimeen niin, että paksunnos jää eteen

Poistaminen

- Tartu etusormella renkaan reunasta ja poista rengas varovasti

Puhdistaminen käytön jälkeen

- Pestään juoksevilla vedellä
- Keittäminen tai sterilointi saattaa vaurioittaa materiaalia

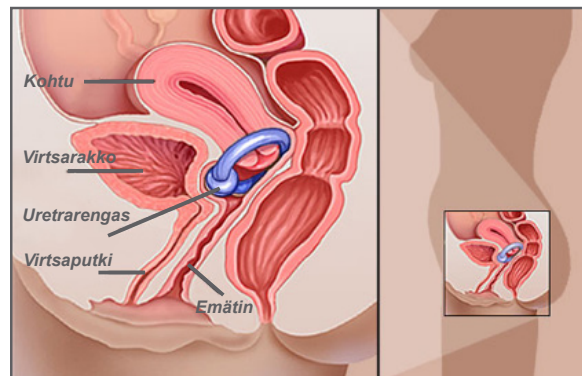

Huom. Mikäli tuotteen käytössä esiintyy ongelmia tai herää kysymyksiä, ole yhteydessä teitä hoitaneeseen yksikköön.

kun hoitotulokset ratkaisevat