

Käyttövinkit

Prolapsirenkaat

Ominaisuudet

- Eriasteisiin vaginan ja kohdun laskeumiin
- Materiaali silikonitai PVC
- Useita eri kokoja
- Silikonirengas suositellaan vaihdettavan uuteen vuoden välein
- Sisältää metallijousen, poistettava ennen MRI-tutkimusta



Käyttö

- Oikea koko on edellytys onnistuneelle hoitotulokselle
- Potilaat, jotka pystyvät itse asettamaan renkaan paikoilleen, suositellaan asennusta aamulla ja poistoa illalla
- Potilaat, jotka eivät pysty itse asettamaan rengasta paikoilleen, lääkäri määrää kontrollivälin limakalvon kunnon tarkastamiseksi. Mikäli huomataan infektiioireita, rengas poistetaan välittömästi.

Paikoilleen asettaminen

- Liukasta rengas vedellä tai voiteella
- Nosta jalka jakkaralle tai sängyn reunalle
- Purista rengas kasaan kahden sormen väliin. Aseta rengas puristettuna mahdollisimman ylös emättimeen, että paksunnos jää eteen.

Poistaminen

- Tartu etusormella renkaan reunasta ja poista rengas varovasti

Puhdistaminen käytön jälkeen

- Pestään päivittäin juoksevalla vedellä
- Keittäminen tai sterilointi saattaa vaurioittaa materiaalia

Huomioita

- Lue käyttöohje huolella
- Mikäli tuotteen käytössä esiintyy ongelmia tai herää kysymyksiä, ole yhteydessä teitä hoitaneeseen yksikköön

Sieve Bowl Pessary, Ring Pessary, Thick Ring Pessary. CE-merkitty lääkinällinen laite, CE 0482. Valmistaja: Dr.Arabin GmbH & Co. KG.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Tutustu tuotteen käyttöön liittyviin mahdollisiin varoituksiin.

Steripolar
Taking care further

Ota yhteyttä

steripolar@steripolar.fi

Asiakaspalvelu klo 8.00 – 16.00

Puhelin 09 417 606 00

steripolar.fi

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485