


Käyttövinkit

Uretrarengas

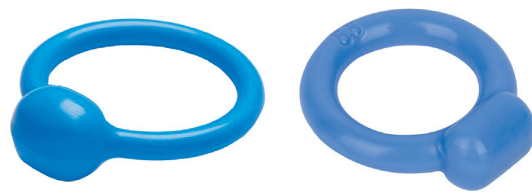


HUOM. Uretrarengas on poistettava ennen MRI-tutkimusta!

Ominaisuudet

- Virtsainkontinenssin hoitoon
- Rengas kohottaa virtsaputken asentoa ja sulkee sen mekaanisesti kiinni emättimen seinämään estäen virtsankarkailua
- Gynekologi arvioi renkaan käyttöajan potilaan yksilöllisten ominaisuuksien ja limakalvojen kunnon mukaan
- Potilas voi asettaa renkaan itse, mahdollisesti päivittäin, kun on saanut ohjauksen sen oikeaoppiseen käyttöön

Käyttö

- Rengas on kiinteää silikonista
- Yleisimmin käytetyt koot: 65 mm–80 mm (saatavilla tarvittaessa 12 kokoa 45 mm – 100 mm)
- Rengas suositellaan vaihtamaan uuteen vuoden välein
- HUOM. Vanhemmat uretrarengasmallit saattavat sisältää metallijousen. Uretrarengas on poistettava ennen MRI-tutkimusta!

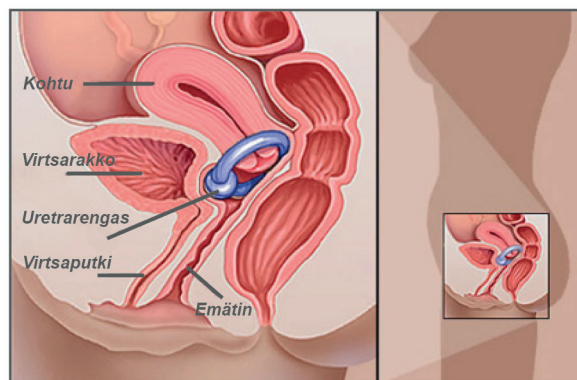

Paikoilleen asettaminen

- Liukasta rengas vedellä tai voiteella
- Nosta jalka jakkaralle tai sängyn reunalle
- Purista rengas kasaan kahden sormen väliin. Aseta rengas puristettuna mahdollisimman ylös emättimeen, että paksunnos jää eteen.

Poistaminen

- Tartu etusormella renkaan reunasta ja poista rengas varovasti

Puhdistaminen käytön jälkeen

- Pestään päivittäin juoksevilla vedellä
- Keittäminen tai steriloiminen saattaa vaurioittaa materiaalia

Huomioita

- Lue käyttöohje huolella.
- Mikäli tuotteen käytössä esiintyy ongelmia tai herää kysymyksiä, ole yhteydessä teitä hoitaneeseen yksikköön.

Urethra Pessary, CE-merkitty lääkinällinen laite, CE 0482. Valmistaja: Dr.Arabin GmbH & Co. KG.

Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöönottoa. Tutustu tuotteen käyttöön liittyviin mahdollisiin varoituksiin.

Steripolar
Taking care further

Ota yhteyttä

steripolar@steripolar.fi

Asiakaspalvelu klo 8.00–16.00

+358 (0)9 417 606 00

steripolar.fi

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 13485