

MEDIHONEYTM

Geelisidos



Edut

- luo haavan paranemisen kannalta sopivan kostean ympäristön.
- Suojaa haavaa ja tuhoaa bakteerikantoja. Tehoaa myös vastustuskykyisiin kantoihin, kuten MRSA ja VRE.
- Kivuttomampaan haavanhoitoon, sillä hunaja vapautuu hitaammin sidoksesta.

Käyttöohjeet

1. Suojaa haavan reunat tarvittaessa Medihoney Barrier Cream -suojavoiteella.
2. Irrota Medihoney Geelityynyn suojakalvot ennen sen asettamista haavalle.
3. Aseta sidos haavan päälle varmistaen, että sidos on kosketuksissa haavapohjan kanssa. Suuremmat haava-alueet voi peittää asettamalla useita sidoksia vierekkäin tai syviin haavoihin usea geelisidos päällekkäin.

Haavalla voidaan myös vaihtoehtoisesti käyttää antibakteerista Medihoney Wound Gel -hunajaa ja peittää haava Medihoney Geelisidoksella.

4. Medihoney Geelityyny peitetään tarttumattomalla haavatyynyllä tai -sidoksella. Haavasidoksen tulee olla runsas imukykyinen imeäkseen haavaeritteet.
5. Haava voidaan puhdistaa sidosten vaihdon yhteydessä normaalia haavanpuhdistusmenetelmää käyttäen.

Medihoney Geelityyny on vaihdettava, kun sidos on muuttunut hyytelömäiseksi ja yllästynyt haavaeritteestä. Sidos voidaan jättää haavan päälle max. 7 päiväksi. Jos haavaeritettä muodostuu runsaasti tai ympäröivä iho hautuu, tulee sidos vaihtaa useammin.

INDIKAATIOT

- sääri- ja jalkahaavat
- painehaavat
- infektoituneet haavat
- hilseilevät haavat
- haisevat haavat
- leikkaushaavat
- palovammat
- pintahaavat, viillot, naarmut, hiertymät
- pinnalliset palovammat

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

2/2016