

MEDIHONEYTM Medical honey

Onkalohaavat

Edut

- laajakirjoinen antibakteerinen teho haavoja kolonisoivia patogeeneja vastaan
- suojaa haavaa risti-infektioilta
- hunajan osmoottinen vaikutus nopeuttaa haavan paranemista
- hunaja luo haavaan matalan pH:n ja edistää kroonisen haavan paranemista
- säilyttää haavaympäristön antibakteerisen kosteana ja luo haavan paranemiselle suotuisat olosuhteet

Käyttöohjeet

1. Suojaa haavaa ympäröivä iho perusvoiteella tai suojavoiteella.
2. Medical Honeyn voi laittaa suoraan haavalle (min. 3 mm paksuudelta) tai esim. kyllästyttää sideharsotaitos hunajalla.
3. Tarkista, että hunaja peittää koko haava-alueen.
4. Peitä haava tarttumattomalla voimakkaasti imevällä sidoksella. Huom! Medical Honey -hunaja lisää hoidon alussa haavaerityksen määrää.
5. Medical Honey tulee vaihtaa max. 7 vrk:n välein riippuen haavaerityksen määrästä. Hoidon alussa sidosvaihdot mahdollisesti useammin. Hunaja absorboituu haavalta kehon lämmöstä ja eritteen mukana.
6. Pseudomonas positiivisissa haavoissa sidoksen vaihtoväli on 1 vrk.

Hoidon alussa saattaa haava-alueella esiintyä pientä pistelyä tai kirkvetyä hunajan aktivoituessa.

Tuubin käyttöaika on 4 kuukautta sen avaamisesta!



INDIKAATIOT

- akuutit ja krooniset avoimet haavat
- syvät haavat
- onkalohaavat
- nekroottiset haavat
- infektoituneet haavat
- kirurgiset haavat
- palohaavat

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004