

MEDIHONEYTM Wound Gel

Pinnalliset haavat

Edut

- laajakirjoinen antibakteerinen teho haavoja kolonisoivia patogeeneja vastaan
- suojaa haavaa risti-infektioilta
- hunajan osmoottinen vaikutus nopeuttaa haavan paranemista
- hunaja luo haavaan matalan pH:n ja edistää kroonisen haavan paranemista
- säilyttää haavaympäristön antibakteerisen kosteana ja luo haavan paranemiselle ihanteelliset olosuhteet
- ei tartu haavaan ja mahdollistaa kivuttoman sidoksen vaihdon

Käyttöohjeet

1. Suojaa haavaa ympäröivä iho perusvoiteella tai suojavoiteella.
2. Wound Gelin voi laittaa suoraan haavalle (noin 3 mm paksuudelta) tai esim. kyllästyttää sideharsotaitos hunajalla.
3. Tarkista, että hunaja peittää koko haava-alueen.
4. Peitä haava tarttumattomalla voimakkaasti imevällä sidoksella. Huom! Wound Gel -hunaja lisää hoidon alussa haavaerityksen määrää.
5. Wound Gel tulee vaihtaa max. 7 vrk:n välein riippuen haavaerityksen määrästä. Hoidon alussa sidosvaihdot mahdollisesti useammin. Hunaja absorboituu haavalta kehon lämmöstä ja eritteen mukana.
6. Pseudomonas positiivisissa haavoissa sidoksen vaihtoväli on 1 vrk.

Hunajan aktivoituessa saattaa haava-alueella esiintyä pistelyä tai kirvelyä.



INDIKAATIOT

- kirurgiset haavat
- akuutit ja krooniset avoimet haavat
- pinnalliset haavat
- palovammat
- säärihaavat
- painehaavat
- ihonotto kohta
- ihonsiirtokohta

Tuubin käyttöaika on 4 kuukautta sen avaamisesta!

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

www.steripolar.fi

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004

2/2016