

Coach2 kannustava spirometri



Nämä ohjeet sisältävät tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue huolella käyttöohje sekä varoitukset ennen tuotteen käyttöä. Mikäli ohjeita ja varoituksia ei noudateta, voi seurauksena olla vakava loukkaantuminen. Hoitotyön harjoittajan vastuulla on, että käyttö- ja huolto-ohjeet on ymmärretty ja jaettu jokaiselle hoitoon osallistuvalla.

1. Kuvaus

Coach2 tuloksiin kannustava spirometri on epästeriili, henkilökohtaiseen hoitoon tarkoitettu hengityslaitte. Laitteessa on liitäntä lisähapen jakelua varten. Kaikkien potilaiden on kyettävä noudattamaan tuloksiin kannustavan spirometrin käyttöön liittyviä ohjeita.

2. Käyttöaiheet

Coach2-laitetta käytetään tuloksiin kannustavaan spirometriaan. Laitte auttaa leikkauksista toipuvia potilaita ja/tai potilaita, jotka vaativat syvähengitysharjoitusta harjoittaakseen ja mitataksaan hidasta, syvää sisäänhengitystä edesauttaen eritteiden irtoamista, auttaen atelektaasin hoidossa ja/tai auttaen ilmateiden avaamisessa.

Coach2 tuloksiin kannustavaa spirometria voidaan käyttää sairaalassa ja/tai kotona.

3. Vasta-aiheet

Tälle laitteelle ei ole todettu vasta-aiheita

4. Varo-ohjeet

- Jotta laite toimisi optimaalisesti, sitä ei tulisi kallistaa käytön aikana. Sijoita laite tasaiselle alustalle ja mahdollisimman lähelle silmien tasoa.
- Mikäli laitetta täytyy tasapainottaa käytön aikana, tulisi se tehdä tarttumalla vain laitteen kädensijaan.

kun hoitotulokset ratkaisevat

Käyttöohjeet

1. Yhdistä letku liitinporttiin ja vedä sopivan mittaiseksi
2. Liuta keltainen tavoitemittari haluttuun täyttömäärään (ml)
3. Uloshengitä syvään ”keuhkot tyhjiksi” ilman, että laitat laitetta vielä suuhun. Sen jälkeen laita huulet tiukasti suukappaleen ympärille.
4. Sisäänhengitä hitaasti syvään pitäen samalla nouseva, keltainen ilmeenosoitin mahdollisimman lähellä hymynaamaa.
5. Sisäänhengitä niin syvään kuin pystyt. Kun et pysty enää vetämään henkeä sisään, pidätä hengitystä 6 sekuntia ja tarkista saavutettu taso. Yritä saavuttaa tavoitteeksi asettamasi taso.
6. Toista ohjeiden mukaan.
7. Lisähapen käyttö: Potilaille, jotka tarvitsevat lisähapetta, tuubin portti on sijoitettu laitteen toiselle puolelle. Standardi happiletkusto voidaan liittää porttiin ja hapetta jakaa harjoituksen aikana. Sisäänhengitetyn hapen osuus vähenee kun potilas hengittää nopeammin.



Huom! Lue käyttöohjeet. Lateksiton. Ei saa käyttää mikäli pakkaus rikki. Ei steriili. Erä numero. Valmistuspäivä. Määrä. Tilausnumero.

Varoitus: USA:n liittovaltion laki rajoittaa laitteen myynnin lääkärin toimesta tai lääkärin määräyksestä Smiths medical ja Portex –suunnittelumerkit ja Coach2 ovat Smiths Medical –yhtiöiden tavaramerkkejä. Merkki ® tarkoittaa, että tavaramerkki on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa sekä eräissä muissa maissa. Näitä tuotteita koskee yksi tai useampi seuraavista yhdysvaltalaisista patenteista: US 5,984,873 ja USD 403,769; muut vireillä olevat patentit.

2007 Smiths Medical –yritykset. Kaikki oikeudet pidätetään.

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

| www.steripolar.fi

| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004