

Resistex PEP-terapiaalaite

Käyttöohje



Näin käytät Resistexiä:

1. Laita suukappale suuhun, nuoli "INTAKE" osoittaa potilaspäähän.
2. Pidä huulet tiiviisti suukappaleen ympärillä ja ota normaalia syvempi sisäänhenkäys.
3. Uloshengitä rauhallisesti, ei voimalla. Uloshengityksen tulisi kestää 2-3 kertaa kauemmin kuin sisäänhengityksen. Varmista ettei ilma pääse karkaamaan suukappaleen ympäriltä tai nenän kautta pitäen huulet tiiviisti suukappaleessa uloshengityksen ajan.
4. Käytä laitetta 5 - 15 minuutin ajan ja toista harjoittelu useamman kerran päivän aikana tarpeen mukaan.

Suukappaleen tilalle voidaan liittää maski jos tarvittavaa tiiviyyttä ei muuten saada. Laitte voidaan liittää myös trakeostomiakanyyliin erillisen yhdistäjän avulla.

Laitteeseen voi kytkeä nebulisaattorin, tarvittava yhdistäjä tulee pakkauksessa.



Puhdistus

1. Irrota suukappale tai maski ja avaa manomatin portti.
2. Pese laite ja suukappale päivittäin harjoittelun päätteeksi lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla.
3. Huuhte laite lämpimällä vedellä ja ravista ylimääräinen vesi pois. Jätä kuivumaan puhtaalle alustalle.
4. Voidaan tarvittaessa upottaa desinfioivaan nesteeseen.

Manometrin liittäminen

Laitteeseen voidaan liittää manometri uloshengityksen paineen seuraamiseksi. Manometri kytketään laitteen pohjassa olevaan porttiin. Sopivan vastuksen määrittämiseksi uloshengitä pitkään ja rauhallisesti Resistexin läpi. Säädä samalla vastuksen säätimestä sopiva asetus (1-4) niin, että manometri näyttää uloshengityksen paineen olevan 10-20 cmH₂O. Kun sopiva vastustaso on valittu, poista manometri laitteesta.

Potilaskohtainen
Lateksiton

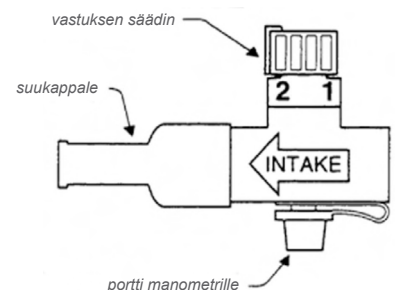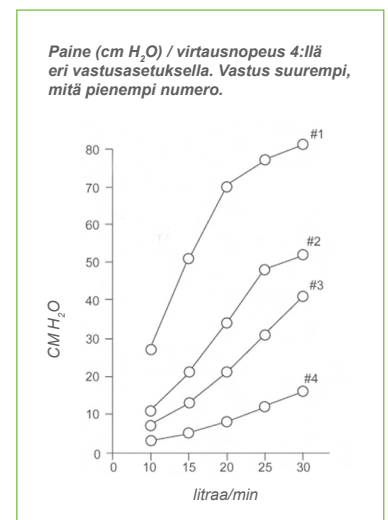

kun hoitotulokset ratkaisevat

Steripolar

Puh. 09 417 606 00

| www.steripolar.fi

| ISO 9001:2008 ISO 14001:2004